

SNUGFIT

exibe



STEP 1

Xé vỏ bao bì và lấy bao cao su ra. Cần thận với móng tay sắc nhọn và đồ trang sức

Tear open the foil and take the condom out. Be careful with sharp fingernails or jewellery



STEP 2

Ấn phần đầu bằng ngón cái và ngón trỏ để đuổi không khí. Dừng khi dương vật cương cứng.

Squeeze the tip between your thumb and your index finger to expel the air. Put on when the penis is erect.



STEP 3

Sau khi xuất tinh, hãy rút ra khi dương vật còn cương cứng. Giữ phần đế của bao cao su để tránh trượt ra.

After ejaculation, withdraw while the penis is still erect. Hold on to the base of the condom in order to prevent it sliding off.



STEP 4

Thắt nút bao cao su rồi vứt đi. Lưu ý không được xả xuống bồn cầu.

Tie a knot in the condom and throw it away. Never flush it down the toilet.

Giấy phép sản phẩm



Lubricated
Strawberry Scent

100%

Electronically
Tested



Natural
Latex Rubber

Holding Closer



12
condoms



exibe

Excite!
TOGETHER

Quy cách / Packaging
12 condoms/box

Thông số / Technical information
Dài/Length: 160mm
Rộng/Width: 49mm
Độ mỏng/Thickness: 0.06-0.08mm

Điều kiện bảo quản / Storage

Bảo quản sản phẩm ở 5-30° C, ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
Storage from 5-30 Celcius degree, in a dry place, avoid direct sunlight.

Lưu ý / Warning

- Kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm trước khi sử dụng.
Check product integrity before use.
- Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Use each condom only once.
- Không sử dụng cùng chất bôi trơn ở dạng dầu.
Avoid using oil-based lubricant.

Nhập khẩu và phân phối / Imported and Distributed by:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPCIH
Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhà sản xuất / Manufacturer:

Thai Nippon Rubber Industry Co., Ltd
Pinthong Industrial Estate 789/129
Nongkham Subdistrict, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand.

exibe

SNUGFIT

Hơn cả Vừa Vặn



Chất Bôi Trơn
Hương Dầu Tây

100%

Kiểm Tra Rò Rỉ
Bằng Máy



Nguồn Cao Su
Tự Nhiên

Holding Closer



12
condoms



Số lô/Lot no.:
NSX/Mfg date:
HSD/Exp date:
Số phân loại TTBYT:



exibe

Excite!
TOGETHER

Quy cách / Packaging

03 condoms/box

Thông số / Technical information

Dài/Length: 160mm

Rộng/Width: 49mm

Độ mỏng/Thickness: 0.06-0.08mm

Điều kiện bảo quản / Storage

Bảo quản sản phẩm ở 5-30° C, ở nơi

khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Storage from 5-30 Celcius degree,

in a dry place, avoid direct sunlight.

**Nhập khẩu và phân phối / Imported
and Distributed by:**

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPCIHN

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương,

Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Lưu ý / Warning

• Kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm trước khi sử dụng.
Check product integrity before use.

• Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Use each condom only once.

• Không sử dụng cùng chất bôi trơn ở dạng dầu.
Avoid using oil-based lubricant.

Nhà sản xuất / Manufacturer:

Thai Nippon Rubber Industry Co., Ltd

Pinthong Industrial Estate 789/129

Nongkham Subdistrict, Sriracha,

Chonburi 20110, Thailand.



Số lô/Lot no.:

NSX/Mfg date:

HSD/Exp date:

Số phân loại TTBYT:



SNUGFIT

exibe



Chất Bôi Trơn
Hương Dầu Cây

100%

Kiểm Tra Rò Rỉ
Bằng Máy



Nguồn Cao Su
Tự Nhiên

3

condoms



exibe
SNUGFIT
Hơn cả Vừa Vặn



Holding Closer

Excite!
TOGETHER

exibe

Excite!
TOGETHER



100%



exibe

LOT: 00000000

MFG: 00/0000

EXP: 00/00/00



Tên sản phẩm: Excibe Snugfit
Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối
Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Tên và địa chỉ của nhà sản xuất
Thai Nippon Rubber Industry Co., Ltd
Pinthong Industrial Estate 789/129 Nongkham Subdistrict, Sriracha, Chon-buri 20110, Thailand.

Quy cách: 144 cái/túi
Thông số kỹ thuật
Dài/Length: 160mm
Rộng/Width: 49mm
Dộ dày/Thickness: 0.06-0.08mm
Điều kiện bảo quản: Bảo quản sản phẩm ở 5-30°C, ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
Storage from 5-30 Celcius degree, in a dry place, avoid direct sunlight.
Lưu ý: Kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm trước khi sử dụng / Check product integrity before use.
Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Use each condom only once.
Không sử dụng cùng chất bôi trơn dạng dầu.
Avoid using oil-based lubricant.

Số lô/NSX/HSD:
Hướng dẫn sử dụng:
B1: Xé vỏ bao bì và lấy bao cao su ra. Cần thận với móng tay sắc nhọn và đồ trang sức.
B2: Ấn nhẹ phần đầu bằng ngón cái và ngón trỏ để đuổi không khí. Mang bao khi dương vật cương cứng.
B3: Sau khi xuất tinh, hãy rút ra khi dương vật vẫn còn cương cứng. Giữ chặt phần đế của bao cao su để tránh trượt ra.
B4: Thắt nút bao cao su rồi vứt đi, Không được xả xuống bồn cầu.