

ORIGINAL

exibe



STEP 1

Xé vỏ bao bì và lấy bao cao su ra. Cần thận với móng tay sắc nhọn và đồ trang sức

Tear open the foil and take the condom out. Be careful with sharp fingernails or jewellery



STEP 2

Ấn phần đầu bằng ngón cái và ngón trỏ để đuổi không khí. Dùng khi dương vật cương cứng.

Squeeze the tip between your thumb and your index finger to expel the air. Put on when the penis is erect.



STEP 3

Sau khi xuất tinh, hãy rút ra khi dương vật còn cương cứng. Giữ phần đế của bao cao su để tránh trượt ra.

After ejaculation, withdraw while the penis is still erect. Hold on to the base of the condom in order to prevent it sliding off.



STEP 4

Thắt nút bao cao su rồi vứt đi. Lưu ý không được xả xuống bồn cầu.

Tie a knot in the condom and throw it away. Never flush it down the toilet.

Giấy phép sản phẩm



LATEX

2



Lubricated
Strawberry Scent

100%

Electronically
Leakage Tested



Premium
Latex Rubber

Original Orgasm

ISO

12
condoms

exibe

Excite!
TOGETHER

Quy cách / Packaging
12 condoms/box

Thông số / Technical information
Dài/Length: 180mm
Rộng/Width: 52mm
Độ mỏng/Thickness: 0.06-0.08mm

Điều kiện bảo quản / Storage

Bảo quản sản phẩm ở 5-30° C, ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
Storage from 5-30 Celcius degree, in a dry place, avoid direct sunlight.

Lưu ý / Warning

- Kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm trước khi sử dụng.
Check product integrity before use.
- Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Use each condom only once.
- Không sử dụng cùng chất bôi trơn ở dạng dầu.
Avoid using oil-based lubricant.

Nhập khẩu và phân phối / Imported and Distributed by:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhà sản xuất / Manufacturer:

Thai Nippon Rubber Industry Co., Ltd
789/139, Moo 1, Pinthong Industrial Estate, Nongkham, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand

MADE IN THAILAND

Metalize Silver

Emboss

exibe

ORIGINAL
Original Feeling



Chất Bôi Trơn
Hương Dầu Tây

100%

Kiểm Tra Rò Rì
Bằng Máy



Cao Su Latex
Cao Cấp

Nguyên, Thủy...

ISO

12
chiếc

Số lô/Lot no.:

NSX/Mfg date:

HSD/Exp date:

Số phân loại TTBYT:



exibe

Excite!
TOGETHER

Quy cách / Packaging

03 condoms/box

Thông số / Technical information

Dài/Length: 180mm

Rộng/Width: 52mm

Độ mỏng/Thickness: 0.06-0.08mm

Điều kiện bảo quản / Storage

Bảo quản sản phẩm ở 5-30°C, ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Storage from 5-30 Celcius degree, in a dry place, avoid direct sunlight.

Nhập khẩu và phân phối / Imported and Distributed by:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Lưu ý / Warning

• Kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm trước khi sử dụng.

Check product integrity before use.

• Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.

Use each condom only once.

• Không sử dụng cùng chất bôi trơn ở dạng dầu.

Avoid using oil-based lubricant.



STEP 4



STEP 3



STEP 2



STEP 1



ORIGINAL

exibe



Lubricated
Strawberry Scent

100%

Electronically
Leakage Tested



Premium
Latex Rubber

3

condoms

exibe

ORIGINAL
Original Feeling



Original Orgasm

Metalize Silver

Emboss

Excite!
TOGETHER

Số lô/Lot no.:

NSX/Mfg date:

HSD/Exp date:

Số phân loại TTBYT:



8 936098 196707 4

Silver

1
condom

exibe

Excite!
TOGETHER



ORIGINAL
LOT: 00000000
MFG: 00/0000
EXP: 00/00/00

Tên sản phẩm: Excibe Original

Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

Thai Nippon Rubber Industry Co., Ltd

789/139, Moo 1, Pinthong Industrial Estate, Nongkham, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand.

Quy cách: 144 cái/túi

Thông số kỹ thuật

Dài/Length: 180mm

Rộng/Width: 52mm

Dộ dày/Thickness: 0.06-0.08mm

Điều kiện bảo quản: Bảo quản sản phẩm ở 5-30°C, ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Storage from 5-30 Celcius degree, in a dry place, avoid direct sunlight.

Lưu ý: Kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm trước khi sử dụng / Check product integrity before use.

Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.

Use each condom only once.

Không sử dụng cùng chất bôi trơn dạng dầu.

Avoid using oil-based lubricant.

Số lô/Lot number:

NSX/Mfg Date:

HSD/EXP Date:

Số TTBYT:

Hướng dẫn sử dụng:

B1: Tear open the foil and take the condom out. Be careful with sharp fingernails or jewellery.

B2: Squeeze the tip between your thumb and your index finger to expel the air. Put on when the penis is erect.

B3: After ejaculation, withdraw while the penis is still erect. Hold on to the base of the condom in order to prevent it sliding off.

B4: Tie the knot in the condom and throw it away. Never flush it down the toilet.