

DOT&RIBV

exibe



STEP 1

Xé vỏ bao bì và lấy bao cao su ra. Cần thận với móng tay sắc nhọn và đồ trang sức

Tear open the foil and take the condom out. Be careful with sharp fingernails or jewellery



STEP 2

Ấn phần đầu bằng ngón cái và ngón trỏ để đuổi không khí. Dừng khi dương vật cương cứng.

Squeeze the tip between your thumb and your index finger to expel the air. Put on when the penis is erect.



STEP 3

Sau khi xuất tinh, hãy rút ra khi dương vật còn cương cứng. Giữ phần đế của bao cao su để tránh trượt ra.

After ejaculation, withdraw while the penis is still erect. Hold on to the base of the condom in order to prevent it sliding off.



STEP 4

Thắt nút bao cao su rồi vứt đi. Lưu ý không được xả xuống bồn cầu.

Tie a knot in the condom and throw it away. Never flush it down the toilet.

Giấy phép sản phẩm



Extra Dotted
Extra Pleasure

100%

Electronically
Leakage Tested



Premium
Latex Rubber

Extra the Excitement



12
condoms



exibe

Excite!
TOGETHER

Quy cách / Packaging
12 condoms/box

Thông số / Technical information
Dài/Length: 180mm
Rộng/Width: 52mm
Độ mỏng/Thickness: 0.06-0.08mm

Điều kiện bảo quản / Storage
Bảo quản sản phẩm ở 5-30° C, ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.
Storage from 5-30 Celcius degree, in a dry place, avoid direct sunlight.

Lưu ý / Warning

- Kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm trước khi sử dụng.
Check product integrity before use.
- Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.
Use each condom only once.
- Không sử dụng cùng chất bôi trơn ở dạng dầu.
Avoid using oil-based lubricant.

Nhập khẩu và phân phối / Imported and Distributed by:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhà sản xuất / Manufacturer:

Thai Nippon Rubber Industry Co., Ltd
789/139, Moo 1, Pinthong Industrial Estate, Nongkham, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand

MADE IN THAILAND

exibe

DOT&RIB

Tận Cùng Xúc Cảm



Hạt Nổi Mịn
Gia Tăng Cảm Xúc

100%

Kiểm Tra Rò Rỉ
Bằng Máy



Cao Su Latex
Cao Cấp

Gia tăng Cảm xúc



12
chiếc



Số lô/Lot no.:
NSX/Mfg date:
HSD/Exp date:
Số phân loại TTBYT:



exibe *Excite!*
TOGETHER

Quy cách / Packaging

03 condoms/box

Thông số / Technical information

Dài/Length: 160mm

Rộng/Width: 49mm

Độ mỏng/Thickness: 0.06-0.08mm

Điều kiện bảo quản / Storage

Bảo quản sản phẩm ở 5-30° C, ở nơi

khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Storage from 5-30 Celcius degree,

in a dry place, avoid direct sunlight.

Nhập khẩu và phân phối / Imported and Distributed by:

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương,
xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Lưu ý / Warning

• Kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm trước khi sử dụng.

Check product integrity before use.

• Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.

Use each condom only once.

• Không sử dụng cùng chất bôi trơn ở dạng dầu.

Avoid using oil-based lubricant.



Số lô/Lot no.:

NSX/Mfg date:

HSD/Exp date:

Số phân loại TTBYT:



DOT&RIB

exibe



exibe
DOT&RIB
Explore the Passion



Extra Dotted
Extra Pleasure

100%

Electronically
Leakage Tested



Premium
Latex Rubber

3
condoms



Extra the Excitement

Excite!
TOGETHER



exibe

Excite!
TOGETHER



DOT&RIB
LOT: 00000000
MFG: 00/0000
EXP: 00/00/00

Tên sản phẩm: Excibe Dot&Rib

Tên và địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương xã Văn Bình, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tên và địa chỉ của nhà sản xuất

Thai Nippon Rubber Industry Co., Ltd

789/139, Moo 1, Pinthong Industrial Estate, Nongkham, Sriracha, Chonburi 20110, Thailand.

Quy cách: 144 cái/túi

Thông số kỹ thuật

Dài/Length: 160mm

Rộng/Width: 49mm

Dộ dày/Thickness: 0.06-0.08mm

Điều kiện bảo quản: Bảo quản sản phẩm ở 5-30°C, ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Storage from 5-30 Celcius degree, in a dry place, avoid direct sunlight.

Lưu ý: Kiểm tra tính nguyên vẹn của sản phẩm trước khi sử dụng / Check product integrity before use.

Sản phẩm chỉ sử dụng một lần.

Use each condom only once.

Không sử dụng cùng chất bôi trơn dạng dầu.

Avoid using oil-based lubricant.

Số lô/Lot number:

NSX/Mfg Date:

HSD/EXP Date:

Số TTBYT:

Hướng dẫn sử dụng:

B1: Tear open the foil and take the condom out. Be careful with sharp fingernails or jewellery.

B2: Squeeze the tip between your thumb and your index finger to expel the air. Put on when the penis is erect.

B3: After ejaculation, withdraw while the penis is still erect. Hold on to the base of the condom in order to prevent it sliding off.

B4: Tie the knot in the condom and throw it away. Never flush it down the toilet.