

Hướng dẫn sử dụng

Dung dịch xịt tai



Thành phần: Mỗi 1 ml chứa:

Natri clorid (muối biển) 35 mg, natri bicarbonat, polysorbat, nước tinh khiết.

Quy cách đóng gói:

Lọ 50 ml. Hộp 1 lọ.

Chỉ định:

- Làm sạch ống tai.
- Giúp phá vỡ và loại bỏ ráy tai tích tụ.
- Giúp ngăn ngừa tích tụ ráy tai.
- Vệ sinh tai trước khi sử dụng các thuốc điều trị tai.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Hướng dẫn sử dụng:

Đối với người có nhiều ráy tai: Xịt 1 nhát vào mỗi tai, 2-3 lần mỗi tuần.

Trong trường hợp ráy tai gây tắc nghẽn: Xịt 2-3 nhát vào mỗi tai sau khi nhỏ dung dịch làm mềm ráy tai ceruminolytic để thúc đẩy rửa trôi mảnh vỡ ráy tai ra ngoài.

Đối với người tiếp xúc nhiều với bụi, sử dụng nhiều thiết bị nghe và máy trợ thính: Xịt 1 nhát vào mỗi tai, 2-3 lần mỗi tuần.

+ Nhẹ nhàng đặt đầu lọ xịt vào tai và giữ cho đầu thẳng đứng, xịt dung dịch vào tai.

+ Mát xa tai trong khoảng 10 giây.

+ Nghiêng đầu sang một bên để thoát nước và lau khô tai ngoài.

+ Rửa sạch đầu vòi bằng nước ấm và lau khô sau mỗi lần sử dụng.


+ Lặp lại cách dùng như trên nếu cần thiết.



An toàn: Công nghệ đóng bag on valve.
Dịch trong túi không tiếp xúc với chai.



Hiệu quả: Hạt phun sương mịn giúp làm sạch tối đa.

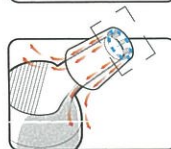

Dễ chịu: Thiết kế đầu xịt giảm áp. Chống tăng áp lực trên tai.

Bảo quản:

Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Số TC: 0203/19/CPC1HN-TC.

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM.

Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

T1-19-150420-H01368-D00001
T1- 22.06.20